

	PEMERIKSAAN ASAM URAT		
	SOP	No. Dokumen : 077/SOP/J/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 23 Januari 2023	
		Halaman : 1/3	
Puskesmas Tanjung			<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
1. Pengertian	Pemeriksaan asam urat adalah pemeriksaan laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa darah yang bertujuan untuk mengetahui kadar asam urat dalam darah.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan asam urat dengan baik dan benar		
3. Kebijakan	Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung Nomor /SK-PKM/ Tentang Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	1. Penuntun Laboratorium Klinik penyusun prof.Dr.R.Ganda Subrata, 1999 2. Petunjuk penggunaan alat nesco		
5. Prosedur	1. Alat a. Alat Pelindung Diri (Jas laboratorium, handscoon, masker medis) b. Alat pemeriksa asam urat merk nesco c. Buku Register Labororium d. Pena dan Spidol e. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium f. Formulir Hasil Laboratorium 2. Bahan a. Strip uji asam urat merk nesco b. Kapas alcohol/ Alkohol Swab c. Blood Lancet d. Kapas kering		
6. Langkah-langkah	1. Petugas Laboratorium menggunakan alat perlindungan diri antara lain Baju lab, Masker dan Handscune 2. Petugas laboratorium mencatat identitas pasien pada buku register 3. Petugas laboratorium memberikan penjelasan kepada pasien tentang maksud dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. 4. Pasang Cip (Code kunci) asam urat yang terdapat nomor code pada slot (tempat cip) 5. Masukkan strip pada lubang alat dengan posisi sesuai dengan gambar anak panah yang tertera pada strip kemudian muncul simbul strip dan nomor kode (pastikan nomor code sama		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN ASAM URAT		<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 2/3	
	dengan nomor yang tertera pada tabung strip) dan gambar tetes darah yang berkedip kedip, 6. Desinfeksi salah satu ujung jari yang akan ditusuk (jari 2, 3 , 4) dengan alkohol swab , tunggu kering baru ditusuk. 7. Buang 3 tetes darah pertama, baru kemudian tetesan berikutnya pada strip pastikan tempat sampel terisi penuh , tutup bekas tutupan dengan kasa kering. 8. Petugas membaca hasil pemeriksaan yang tertera pada layar alat asam urat setelah 20 detik. 9. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan.		
7. Bagan Alir	<pre> graph TD A([Petugas memakai apd]) --> B[Petugas mencatat identitas pasien] B --> C[Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan] C --> D[Memasang cip dan memasukkan strip test asam urat] D --> E[Desinfeksi ujung jari dan ditusuk lancet] E --> F[Buang 3 tetes darah pertama] F --> G[tetesan berikutnya diserap dgn strip] G --> H[Alat membaca otomatis menampilkan kadar asam urat] H --> I[Petugas mencatat hasil pemeriksaan dibuku register dan blanko hasil pemeriksaan laboratorium] </pre>		
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Mengidentifikasi pasien apakah sudah sesuai 2. Mengecek kelengkapan data formulir permintaan 3. Mengidentifikasi pemeriksaan sesuai permintaan 4. Mengecek kelengkapan hasil pemeriksaan		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN ASAM URAT		<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 3/3	
9. Unit Terkait	1. Poli Umum, 2. Poli KIA, 3. Poli IGD, 4. Poli Gigi, 5. Ruang Bersalin		
10. Dokumen Terkait	1. Buku Register Laboratorium 2. Lembar Permintaan pemeriksaan laboratorium. 3. Lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium.		

	PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH		
	SOP	No. Dokumen : 078 /SK/T/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 23 Januari 2023	
Halaman : 1/3			
Puskesmas Tanjung			<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
1. Pengertian	Pemeriksaan golongan darah merupakan pemeriksaan laboratorium dengan sampel darah untuk menentukan jenis antigen yang terdapat pada permukaan sel darah.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan golongan darah dengan baik dan benar		
3. Kebijakan	Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung Nomor /SK-PKM/ Tentang Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	1. Penuntun Laboratorium Klinik penyusun prof.Dr.R.Ganda Subrata, 1999		
5. Prosedur	1. Alat a. Alat Pelindung Diri (Jas laboratorium, handscoon, masker medis) b. Kartu golongan darah c. Buku Register Laboratorium d. Pena dan Spidol e. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium f. Formulir Hasil Laboratorium 2. Bahan a. Monoclonal Anti – A b. Monoclonal Anti – B c. Monoclonal Anti – AB d. Monoclonal Anti – D e. Kapas alcohol/ Alkohol Swab f. Blood Lancet g. Kapas kering h. Batang pengaduk		
6. Langkah-langkah	1. Petugas Laboratorium menggunakan alat perlindungan diri antara lain Baju lab, Masker dan Handscone 2. Petugas laboratorium mencatat identitas pasien pada buku register 3. Petugas laboratorium memberikan penjelasan kepada pasien tentang maksud dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. 4. Petugas siapkan Kartu golongan darah dan diisi data pasien		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH		Zainuddin, AMK NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 2/3	
	5. Petugas melakukan desinfeksi ujung jari dengan swab alcohol 6. Petugas menusuk ujung jari dengan lancet (disposibel) 7. Petugas menghapus 3 tetes darah yang pertama keluar, tetesan berikutnya didapat sebanyak 4 tetesan masing masing 1 tetes pada 4 tempat yang telah terdapat tanda pada kartu golongan darah. 8. Petugas meneteskan 1tetes serum anti sesuai tanda masing disamping tetesan darah. 9. Petugas melakukan pencampuran dengan mengaduk dengan pengaduk kaca bersih dan kering/kertas setiap tetesan dengan segera untuk menghindari sampel darah beku sebelum di campur. 10. Goyang perlahan sambil diamati adanya bekuan 11. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan		
7. Bagan Alir	<pre> graph TD A([Petugas memakai apd]) --> B[Petugas mencatat identitas pasien] B --> C[Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan] C --> D[Petugas menyiapkan kartu golongan darah dan diisi data] D --> E[desinfeksi ujung jari dengan swab alkohol] E --> F[Petugas menusuk ujung jari dengan lancet] F --> G[4 tetesan darah pada kartu golongan darah] G --> H[1 tetes serum antisera masing disamping tetesan darah] H --> I[mengaduk dengan pengaduk kaca bersih dan kering/ kertas] I --> J[Goyang perlahan sambil diamati adanya bekuan] J --> K[Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan] </pre>		
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Mengidentifikasi pasien apakah sudah sesuai 2. Mengecek kelengkapan data formulir permintaan 3. Mengidentifikasi pemeriksaan sesuai permintaan 4. Mengecek kelengkapan hasil pemeriksaan		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH		Zainuddin, AMK NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 3/3	
9. Unit Terkait	1. Poli Umum, 2. Poli KIA, 3. Poli IGD, 4. Poli Gigi, 5. Ruang Bersalin		
10. Dokumen Terkait	1. Buku Register Laboratorium 2. Lembar Permintaan pemeriksaan laboratorium. 3. Lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium.		