

	PEMERIKSAAN HCG		
	SOP	No. Dokumen : 069/sop/1/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 23 Januari 2023	
		Halaman : 1/3	
Puskesmas Tanjung			<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
1. Pengertian	Pemeriksaan Kehamilan adalah pemeriksaan Laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa urine yang bertujuan untuk mengetahui kadar beta-HCG dalam urine sebagai penanda kehamilan.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan hcg dengan baik dan benar		
3. Kebijakan	Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung Nomor /SK-PKM/ Tentang Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	Kit Insert rapid tes hcg		
5. Prosedur	1. Alat a. Alat Pelindung Diri (Jas laboratorium, handscoon, masker medis) b. Buku Register Laboratorium c. Pena dan Spidol d. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium e. Formulir Hasil Laboratorium 2. Bahan a. Strip rapid tes hcg b. Kapas alcohol/ Alkohol Swab c. Blood Lancet d. Kapas kering		
6. Langkah-langkah	1. Petugas Laboratorium menggunakan alat perlindungan diri antara lain Baju lab, Masker dan Handscune 2. Petugas laboratorium mencatat identitas pasien pada buku register 3. Petugas laboratorium memberikan penjelasan kepada pasien tentang maksud dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. 4. Siapkan Pot Urin 5. Petugas laboratorium menyuruh pasien ke kamar kecil menampung air kencing dan ditutup rapat kemudian diserahkan petugas laboratorium. 6. Petugas laboratorium menerima sampel urin		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN HCG		Zainuddin, AMK NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 2/3	
	7. Petugas laboratorium membuka tes strip dari kemasan kemudian mencelupkan kedalam urin dengan arah panah ke bawah. 8. Setelah 3 detik diangkat dan diletakkan ditempat datar permukaan bersih dan kering 9. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan.		
7. Bagan Alir	Petugas memakai apd Petugas mencatat identitas pasien Pasien menampung air seni Petugas menerima air seni Di amati hasilnya (tanda garis) Petugas mencatat hasil pemeriksaan dibuku register dan blanko hasil pemeriksaan laboratorium Petugas memberi label Pot Strip test dibuka , dicelupkan ke urin Diletakkan pada tempat datar		
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Mengidentifikasi pasien apakah sudah sesuai 2. Mengecek kelengkapan data formulir permintaan 3. Mengidentifikasi pemeriksaan sesuai permintaan 4. Mengecek kelengkapan hasil pemeriksaan		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN HCG		Zainuddin, AMK NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 3/3	
9. Unit Terkait	1. Poli Umum, 2. Poli KIA, 3. Poli IGD, 4. Poli Gigi, 5. Ruang Bersalin		
10. Dokumen Terkait	1. Buku Register Laboratorium 2. Lembar Permintaan pemeriksaan laboratorium. 3. Lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium.		