

	PEMERIKSAAN HIV		
	SOP	No. Dokumen : 092/Scp /1 /2023	
		No Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 23 Januari 2023	
	Halaman : 1/2		
Puskesmas Tanjung			<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
1. Pengertian	HIV adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang system kekebalan (imunitas) tubuh		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan hiv dengan baik dan benar		
3. Kebijakan	Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung Nomor /SK-PKM/ Tentang Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	Kit Insert Reagen Rapid Virocheck HIV-1/2		
5. Prosedur	1. Alat a. Alat Pelindung Diri (Jas laboratorium, handscoon, masker medis) b. Buku Register Laboratorium c. Kit Insert Reagen Rapid Virocheck HIV-1/2 d. Torniquet e. Pena dan Spidol f. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium g. Formulir Hasil Laboratorium 2. Bahan a. Kapas alcohol/ Alkohol Swab b. Buffer HIV-1/2 c. Spuit 1 cc d. Kapas kering		
6. Langkah-langkah	1. Petugas Laboratorium menggunakan alat perlindungan diri antara lain Baju lab, Masker dan Handscune 2. Petugas laboratorium mencatat identitas pasien pada buku register 3. Petugas laboratorium memberikan penjelasan kepada pasien tentang maksud dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. 4. Petugas mengambil darah pasien 1cc 5. Ambil reagen test HIV (R1) buka, Teteskan sampel darah dengan menggunakan pipet yang tersedia dalam reagen ke dalam lubang sample (s) 6. Tambahkan 3 tetes buffer hiv-1/2 ditempat yang sama 7. Tunggu selama 10-15 menit		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN HIV		Zainuddin, AMK NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 2/2	
	8. Baca hasil pemeriksaan		
	9. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan		
7. Bagan Alir	<pre> graph TD A([Petugas memakai apd]) --> B[Petugas mencatat identitas pasien] B --> C[Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan] C --> D[Petugas mengambil darah pasien 1cc] D --> E[Teteskan sampel darah ke dalam lubang sample (s)] E --> F[Tambahkan 3 tetes buffer hiv-1/2 ditempat yang sama] F --> G[Tunggu selama 10-15 menit] G --> H[Baca hasil pemeriksaan] H --> I[Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan] </pre>		
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Mengidentifikasi pasien apakah sudah sesuai 2. Mengecek kelengkapan data formulir permintaan 3. Mengidentifikasi pemeriksaan sesuai permintaan 4. Mengecek kelengkapan hasil pemeriksaan		
9. Unit Terkait	1. Poli Umum, 2. Poli KIA, 3. Poli IGD, 4. Poli Gigi, 5. Ruang Bersalin		
10. Dokumen Terkait	1. Buku Register Laboratorium 2. Lembar Permintaan pemeriksaan laboratorium. 3. Lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium.		