

	PEMERIKSAAN KOLESTEROL		
	SOP	No. Dokumen : 096 / SOP / 1 / 2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 23 Januari 2023	
Halaman : 1/3			
Puskesmas Tanjung			<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
1. Pengertian	Pemeriksaan kolesterol adalah pemeriksaan laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa darah yang bertujuan untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan kolesterol dengan baik dan benar		
3. Kebijakan	Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung Nomor /SK-PKM/ Tentang Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	1. Penuntun Laboratorium Klinik penyusun prof.Dr.R.Ganda Subrata, 1999 2. Petunjuk penggunaan alat nesco		
5. Prosedur	1. Alat a. Alat Pelindung Diri (Jas laboratorium, handscoon, masker medis) b. Alat pemeriksa kolesterol merk nesco c. Buku Register Laboratorium d. Pena dan Spidol e. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium f. Formulir Hasil Laboratorium 2. Bahan a. Strip uji kolesterol merk nesco b. Kapas alcohol/ Alkohol Swab c. Blood Lancet d. Kapas kering		
6. Langkah-langkah	1. Petugas Laboratorium menggunakan alat perlindungan diri antara lain Baju lab, Masker dan Handscone 2. Petugas laboratorium mencatat identitas pasien pada buku register 3. Petugas laboratorium memberikan penjelasan kepada pasien tentang maksud dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. 4. Pasang Cip (Code kunci) kolesterol yang terdapat nomor code pada slot (tempat cip) 5. Masukkan strip pada lubang alat dengan posisi sesuai dengan gambar anak panah yang tertera pada strip kemudian muncul simbul strip dan nomor kode (pastikan nomor code sama		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN KOLESTEROL		Zainuddin, AMK NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 2/3	
	dengan nomor yang tertera pada tabung strip) dan gambar tetes darah yang berkedip kedip, 6. Desinfeksi salah satu ujung jari yang akan ditusuk (jari 2, 3 , 4) dengan alkohol swab , tunggu kering baru ditusuk. 7. Buang 3 tetes darah pertama, baru kemudian tetesan berikutnya pada strip pastikan tempat sampel terisi penuh , tutup bekas tutupan dengan kasa kering. 8. Petugas membaca hasil pemeriksaan yang tertera pada layar alat kolesterol setelah 150 detik. 9. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan.		
7. Bagan Alir	<pre> graph TD A([Petugas memakai apd]) --> B[Petugas mencatat identitas pasien] B --> C[Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan] C --> D[Memasang cip dan memasukkan strip test kolesterol] D --> E[Desinfeksi ujung jari dan ditusuk lancet] E --> F[Buang 3 tetes darah pertama] F --> G[tetesannya berikutnya diserap dgn strip] G --> H[Alat membaca otomatis menampilkan kadar kolesterol] H --> I[Petugas mencatat hasil pemeriksaan dibuku register dan blanko hasil pemeriksaan laboratorium] </pre>		
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Mengidentifikasi pasien apakah sudah sesuai 2. Mengecek kelengkapan data formulir permintaan 3. Mengidentifikasi pemeriksaan sesuai permintaan 4. Mengecek kelengkapan hasil pemeriksaan		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN KOLESTEROL		<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 3/3	
9. Unit Terkait	1. Poli Umum, 2. Poli KIA, 3. Poli IGD, 4. Poli Gigi, 5. Ruang Bersalin		
10. Dokumen Terkait	1. Buku Register Laboratorium 2. Lembar Permintaan pemeriksaan laboratorium. 3. Lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium.		