

	PEMERIKSAAN PROTEIN URIN		
	SOP	No. Dokumen : 070/SOP / I / 2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 23 Januari 2023	
	Halaman : 1/2		
Puskesmas Tanjung			<u>Zainuddin, AMK</u> NIP. 196603071991011003
1. Pengertian	Pemeriksaan protein urin adalah pemeriksaan Laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa urin yang bertujuan untuk mengetahui protein dalam urin		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan protein urin dengan baik dan benar		
3. Kebijakan	Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung Nomor /SK-PKM/ Tentang Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	Petunjuk penggunaan verify urinalysis reagents strips		
5. Prosedur	1. Alat a. Alat Pelindung Diri (Jas laboratorium, handscoon, masker medis) b. Pot urine c. Buku Register Laboratorium d. Pena dan Spidol e. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium f. Formulir Hasil Laboratorium 2. Bahan a. Verify urinalysis reagents strips		
6. Langkah-langkah	1. Petugas Laboratorium menggunakan alat perlindungan diri antara lain Baju lab, Masker dan Handscone 2. Petugas laboratorium mencatat identitas pasien pada buku register 3. Siapkan Pot Urin 4. Petugas laboratorium menyuruh pasien ke kamar kecil menampung air kencing dan ditutup rapat kemudian diserahkan petugas laboratorium. 5. Petugas laboratorium menerima sampel urin 6. Ambil reagents strips urinalysis, celupkan strip 10 detik dalam urin 7. Reagents strip diangkat, dibaca dengan membandingkan warnanya dengan warna pada verify urinalysis reagents strips 8. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan		

Puskesmas Tanjung	PEMERIKSAAN PROTEIN URIN		Zainuddin, AMK NIP. 196603071991011003
	SOP	No Dokumen :	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 2/2	
7. Bagan Alir	<pre> graph TD A([Petugas memakai apd]) --> B[Petugas mencatat identitas pasien] B --> C[Siapkan pot urine] C --> D[Pasien menampung air seni] D --> E[Petugas menerima air seni] E --> F[Ambil reagents strips urinalysis, celupkan strip 10 detik dalam urin] F --> G[dibaca dengan membandingkan warnanya dengan warna pada verify urinalysis reagents strips] G --> H[Petugas mencatat hasil pemeriksaan dibuku register dan blanko hasil pemeriksaan laboratorium] </pre>		
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Mengidentifikasi pasien apakah sudah sesuai 2. Mengecek kelengkapan data formulir permintaan 3. Mengidentifikasi pemeriksaan sesuai permintaan 4. Mengecek kelengkapan hasil pemeriksaan		
9. Unit Terkait	1. Poli Umum, 2. Poli KIA, 3. Poli IGD, 4. Poli Gigi, 5. Ruang Bersalin		
10. Dokumen Terkait	1. Buku Register Laboratorium 2. Lembar Permintaan pemeriksaan laboratorium. 3. Lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium.		